



Global Dent
implant profitable solutions



ЛУЧШАЯ ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Не имеет аналогов для решения сложных клинических случаев. Отличительной чертой этой системы является наличие широкой резьбы, позволяющей добиваться прекрасной первичной стабилизации даже в очень рыхлой кости.

Большая площадь поверхности имплантата. Она вдвое больше поверхности обычного имплантата аналогичного размера, поэтому возможна эффективная фиксация как коротких, так и длинных имплантатов. Синус-лифтинг не потребуется, если высота кости превышает 4 мм.


Уникальная резьба Knife Thread способствует равномерному распределению жевательной нагрузки и сохранению костной ткани, а поверхность Xreed ускоряет остеоинтеграцию имплантата.

Широкая линейка из 55 размеров позволяет подобрать имплантат для любого клинического случая.

Быстрое восстановление эстетики и жевательной функции для пациента. Система позволяет проводить операцию в один этап с немедленной нагрузкой даже в сложных клинических случаях.

Пятиградусное конусное соединение имплантата и абатмента реализует принцип "холодной сварки".

Пожизненная гарантия производителя.

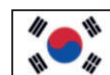

Сделано
в Ю. Корее

Производитель: Megagen

175\$



ПРИ ПОКУПKE 30 ИМПЛАНТАТОВ ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР **В ПОДАРОК!**

Отвертки и динамометрические ключи совместимы с системами AnyOne, INNO, Osstem и др.

ПРИ ПОКУПKE 5 ИМПЛАНТАТОВ ПО 175\$ и предоставлении любого б/у хирургического набора мы предоставим полный хирургический набор AnyRidge **В ПОДАРОК!**



СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД ИМПЛАНТАТОВ

Всегда в наличии более 15 000 SKU: имплантационные системы, сопутствующие материалы, оборудование.

РАБОТА ПО ДЛИННЫМ ДОГОВОРАМ


Фиксируем цену в рублях на 6 месяцев.

Хирургический протокол

- Имплантат AnyRidge® имеет гибкий протокол сверления. Создайте Ваш собственный протокол сверления в зависимости от плотности кости пациента для достижения предпочитаемой величины первичной стабилизации. Или Вы можете просто сформировать адекватное ситуации остеотомическое отверстие и затем решать какой диаметр имплантата использовать



Например: имплантат диаметром 5 мм может быть установлен через остеотомическое отверстие диаметром 2,9 мм при плотности кости D4. При этом будет достигнута превосходная первичная стабилизация.


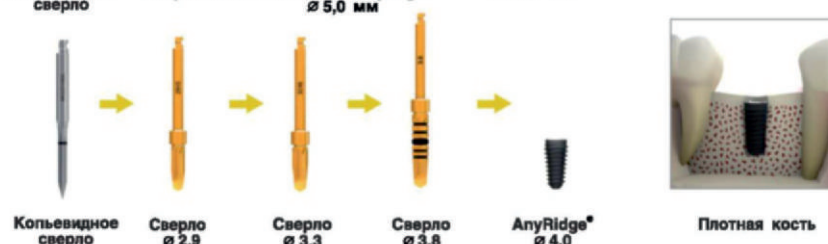


Например: в плотной кости следует формировать отверстие почти того же диаметра, что и имплантат

ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD
3,5 / 2,8 / 3,5 / 4,0	4,0 / 3,3 / 3,5 / 4,4	4,5 / 3,3 / 3,5 / 4,9	5,0 / 3,3 / 3,5 / 5,4	5,5 / 3,3 / 3,5 / 5,9
Длина (мм) Артикул 7 FANIHX3507C 8.5 FANIHX3508C 10 FANIHX3510C 11.5 FANIHX3511C 13 FANIHX3513C 15 FANIHX3515C	Длина (мм) Артикул 7 FANIHX4007C 8.5 FANIHX4008C 10 FANIHX4010C 11.5 FANIHX4011C 13 FANIHX4013C 15 FANIHX4015C	Длина (мм) Артикул 7 FANIHX4507C 8.5 FANIHX4508C 10 FANIHX4510C 11.5 FANIHX4511C 13 FANIHX4513C 15 FANIHX4515C	Длина (мм) Артикул 7 FANIHX5007C 8.5 FANIHX5008C 10 FANIHX5010C 11.5 FANIHX5011C 13 FANIHX5013C 15 FANIHX5015C	Длина (мм) Артикул 7 FANIHX5507C 8.5 FANIHX5508C 10 FANIHX5510C 11.5 FANIHX5511C 13 FANIHX5513C 15 FANIHX5515C
175 \$	175 \$	175 \$	175 \$	175 \$
ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD	ØA ØB ØC ØD
6,0 / 4,8 / 5,0 / 6,4	6,5 / 4,8 / 5,0 / 6,9	7,0 / 4,8 / 5,0 / 7,4	7,5 / 4,8 / 5,0 / 7,9	8,0 / 4,8 / 5,0 / 8,4
Длина (мм) Артикул 7 FALHX6007C 8.5 FALHX6008C 10 FALHX6010C 11.5 FALHX6011C 13 FALHX6013C	Длина (мм) Артикул 7 FALHX6507C 8.5 FALHX6508C 10 FALHX6510C 11.5 FALHX6511C 13 FALHX6513C	Длина (мм) Артикул 7 FALHX7007C 8.5 FALHX7008C 10 FALHX7010C 11.5 FALHX7011C 13 FALHX7013C	Длина (мм) Артикул 7 FALHX7507C 8.5 FALHX7508C 10 FALHX7510C 11.5 FALHX7511C 13 FALHX7513C	Длина (мм) Артикул 7 FALHX8007C 8.5 FALHX8008C 10 FALHX8010C 11.5 FALHX8011C 13 FALHX8013C
175 \$	175 \$	175 \$	175 \$	175 \$

Серия СВЕРХкоротких имплантатов AnyRidge с высокой надежностью.

Почему это работает?

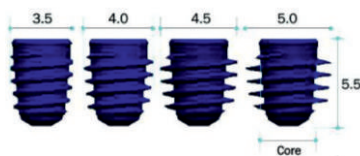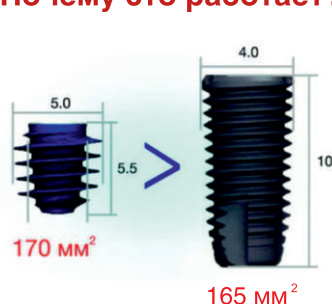

Что это дает?

- Возможность избежать костной пластики при недостаточной высоте кости.
- Возможность значительно сократить сроки реабилитации.
- Возможность значительно снизить травматизм операции.

Ø3.5		MX3505
Ø4.0	3.3	MX4005
Ø4.5		MX4505
Ø5.0		MX5005
*Ø5.0	4.0	MX5005S
*Ø5.5		MX5505S

