

AnyOne®

ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ ИЗ Ю.КОРЕИ

■ Низкая стоимость по сравнению с другими имплантационными системами.

■ Простой и понятный хирургический протокол.

■ Уникальная резьба Knife Thread способствует равномерному распределению жевательной нагрузки и сохранению костной ткани, а поверхность Xreed ускоряет остеоинтеграцию имплантата.

■ Приживаемость имплантатов у пациентов более 99%*, что позволяет клинике экономить на гарантийных случаях.

■ Пожизненная гарантия производителя.

■ Единая ортопедическая платформа на все диаметры имплантатов, совместимая с системами INNO, IMPRO, Dentium.



Сделано
в Ю. Корее

Производитель: Megagen

80 \$


ПРИ ПОКУПKE 30 ИМПЛАНТАТОВ ПОЛНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР **В ПОДАРОК!**

Отвертки и динамометрические ключи совместимы с системами INNO, AnyRidge, Osstem и др.

ПРИ ПОКУПKE 5 ИМПЛАНТАТОВ ПО 80\$

и предоставлении любого б/у хирургического набора мы предоставим полный хирургический набор AnyOne

В ПОДАРОК!

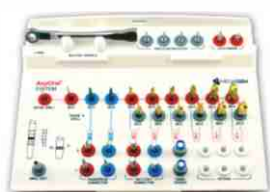

СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД ИМПЛАНТАТОВ

Всегда в наличии более 15 000 SKU: имплантационные системы, сопутствующие материалы, оборудование.


РАБОТА ПО ДЛИННЫМ ДОГОВОРАМ

Фиксируем цену в рублях на 6 месяцев.




*По результатам клинического применения в Группе компаний «Стоматологическая практика»

Хирургический протокол

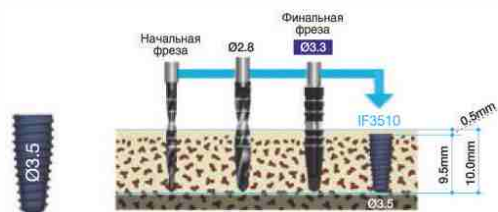


Для имплантата диаметром Ø3,5 мм

Если длина имплантата составляет 10 мм, длина фрезы на 0,59 мм больше, поэтому общая глубина сверления равна **10,59 мм**

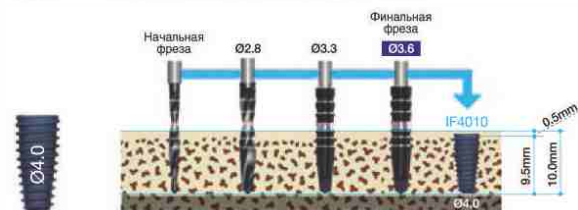


Для имплантата диаметром Ø4.0 мм

Если длина имплантата составляет 10 мм, длина фрезы на 0,68 мм больше, поэтому общая глубина сверления равна **10,68 мм**

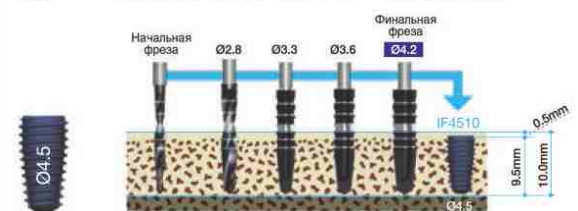


Для имплантата диаметром Ø4.5 мм

Если длина имплантата составляет 10 мм, длина фрезы на 0,85 мм больше, поэтому общая глубина сверления равна **10,85 мм**

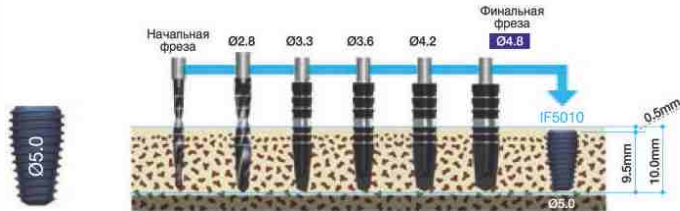

Для имплантата
диаметром Ø5.0 мм

Если длина имплантата составляет 10 мм, длина фрезы на 0,89 мм больше, поэтому общая глубина сверления равна **10,89 мм**

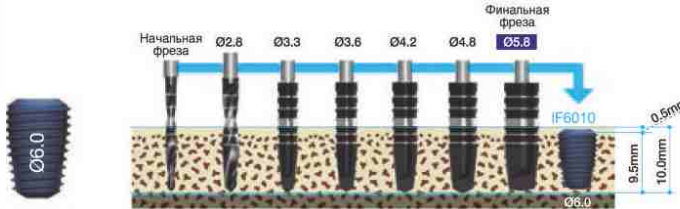

Для имплантата
диаметром Ø6.0 мм

Если длина имплантата составляет 10 мм, длина фрезы на 0,94 мм больше, поэтому общая глубина сверления равна **10,94 мм**

Ø C	Ø D
3,5	3,9
Длина (мм)	Артикул
7.0	IF3507C
8.5	IF3508C
10	IF3510C
11.5	IF3511C
13	IF3513C
15	IF3515C

Ø C	Ø D
4,0	4,3
Длина (мм)	Артикул
7.0	IF4007C
8.5	IF4008C
10	IF4010C
11.5	IF4011C
13	IF4013C
15	IF4015C

Ø C	Ø D
4,5	4,8
Длина (мм)	Артикул
7.0	IF4507C
8.5	IF4508C
10	IF4510C
11.5	IF4511C
13	IF4513C
15	IF4515C

Ø C	Ø D
5,0	5,3
Длина (мм)	Артикул
7.0	IF5007C
8.5	IF5008C
10	IF5010C
11.5	IF5011C
13	IF5013C
15	IF5015C

Ø C	Ø D
6,0	6,3
Длина (мм)	Артикул
7.0	IF6007C
8.5	IF6008C
10	IF6010C
11.5	IF6011C
13	IF6013C

Ø C	Ø D
7,0	7,3
Длина (мм)	Артикул
7.0	IF7007C
8.5	IF7008C
10	IF7010C
11.5	IF7011C
13	IF7013C

Специальные короткие имплантаты AnyOne		
L	L1	
7,0	5,0	
Ø C	Ø D	Артикул
4.5	4.8	IF4507SC
5.0	5.3	IF5007SC
6.0	6.3	IF6007SC
7.0	7.3	IF7007SC

