

Geistlich Bio-Oss[®] Collagen

Geistlich
Biomaterials



Geistlich Bio-Oss[®] Collagen: Что это?



Geistlich Bio-Oss® Collagen: Что это?

Geistlich Bio-Oss® Collagen состоит на 90% из гранул Geistlich Bio-Oss® spongiosa (0.25-1 мм) и на 10% из свиного коллагена высокой степени очистки. Выпускается в виде блока.

Дополнительные 10% свиного коллагена делают его пластичным и удобным в обращении. Регенеративный потенциал заметно отличает Geistlich Bio-Oss® Collagen от обычных коллагеновых матриц.



Geistlich Bio-Oss® Collagen применяется при самых разных показаниях, включая презервацию лунки, незначительную костную аугментацию и переодонтальную регенерацию. Коллаген абсорбируется организмом в течение нескольких недель и не заменяет барьерную функцию мембраны.



Свойства и преимущества Geistlich Bio-Oss® Collagen

Простое манипулирование



Компактный и пластичный

Простое применение




Удобно располагается в месте дефекта

Натуральный коллаген



Биосовместимый

На 90% состоит из Geistlich Bio-Oss®

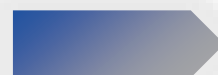

Все преимущества Geistlich Bio-Oss®

Научно обоснованный




Geistlich Bio-Oss®, самый изученный биоматериал



Инструкция по использованию Geistlich Bio-Oss® Collagen

Подготовить Geistlich Bio-Oss® Collagen просто:


- Отрежьте кусок Geistlich Bio-Oss® Collagen нужного Вам размера.
- Используйте его сухим, либо смоченным в крови пациента.
- Смоченному придайте желаемую форму.
- Поместите в место дефекта с помощью пинцета.
- Избегайте чрезмерного сжатия.

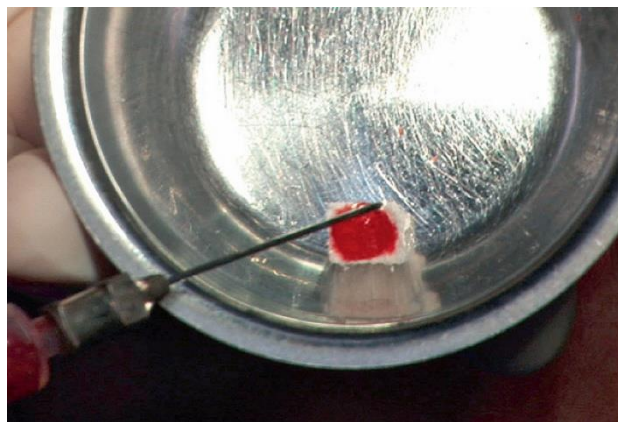

Противопоказания и меры предосторожности

Geistlich Bio-Oss® /Geistlich Bio-Oss® Collagen должны использоваться с особой осторожностью при:

- Острых или хронических инфекциях на оперируемом участке.
- Неконтролируемых метаболических нарушениях (диабет).
 - Длительной терапии, включающей кортикостероиды.
 - Аутоимунных заболеваниях.
 - Радиотерапии.
 - Заядлом курении.

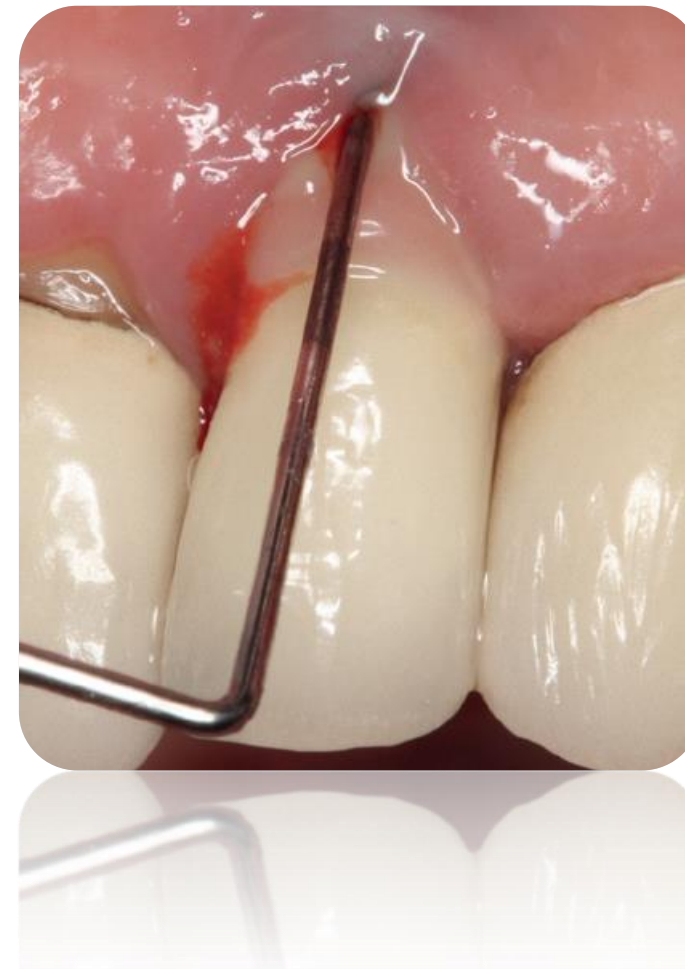

Почему Geistlich Bio-Oss® лучший выбор?

- Естественная морфология, высокая пористость и химический состав подобны аутокости.
 - Высокая гидрофильность способствует хорошему ангиогенезу.
 - Geistlich Bio-Oss® обладает отличной биофункциональностью.
 - Geistlich Bio-Oss® обладает отличной биосовместимостью.
 - Высокая степень остеоинтеграции и остеопроводимости.
 - Остеопластические материалы от Geistlich успешно использовались в более чем десяти миллионах патентов.
 - Geistlich Bio-Oss® - «идеальный стабилизатор» для аутокости с отличными манипуляционными свойствами.
 - Geistlich Bio-Oss® создаёт каркас для будущего формирования собственной костной ткани.
 - Geistlich Bio-Oss® обладает большим объемом относительно веса по сравнению с конкурентами.
 - 30 лет клинического опыта гарантируют высокую степень безопасности и эффективности.

