

С каким усилием фиксировать?

AnyRidge и AnyOne

- Заглушка — 5-8 Нсм
 - Формирователь десны — 5-8 Нсм
 - Временный абатмент — 25 Нсм
 - Пластиковый предохраняющий абатмент — 25 Нсм
 - Постоянный абатмент EZ Post (прямой и угловой) — 35 Нсм
 - Титановое основание CAD/CAM — 35 Нсм
 - Циркониевый абатмент — 35 Нсм
 - Обтачиваемый абатмент — 35 Нсм
 - Приливаемый абатмент с КХС основанием — 35 Нсм
 - Абатмент без переключения платформ Extra EZ Post — 35 Нсм
-
- Прямой мульти-юнит Octa — 35 Нсм
 - Временный цилиндр на мульти-юнит Octa — 25 Нсм
 - Постоянный цилиндр EZ Post на мульти-юнит Octa — 35 Нсм
 - Приливаемый цилиндр с КХС основанием на мульти-юнит Octa — 35 Нсм
 - Пластиковый цилиндр на мульти-юнит Octa — 25 Нсм
 - Титановое основание CAD/CAM на мульти-юнит Octa — 35 Нсм
-
- Мульти-юнит абатмент N-type – прямой — 35 Нсм
 - Мульти-юнит абатмент N-type – угловой — 25 Нсм
 - Временный цилиндр на мульти-юнит абатмент N-type — 15 Нсм
 - Приливаемый цилиндр с КХС основанием на мульти-юнит абатмент N-type — 15 Нсм
 - Титановое основание CAD/CAM на мульти-юнит N-type — 15 Нсм
-
- Спейсер для сетки i-Gen — 25 Нсм
 - Временный цилиндр с уровня спейсера для i-Gen — 15 Нсм
 - Цилиндр EZ Post с уровня спейсера для i-Gen — 25 Нсм
 - Цилиндр с КХС основанием с уровня спейсера для i-Gen — 25 Нсм

- Пластиковый цилиндр с уровня спейсера для i-Gen — 25 Нсм
- Локатор Meg-Rhein — 15 Нсм